

# Liberty Drainable Dual Adhesive



## WFD013

### USO PREVISTO

Utilizado para recolectar la materia fecal eliminada por el intestino a través de un ostoma.

### INSTRUCCIONES DE USO

---

#### 1 Preparación de la piel

- Limpiar cualquier residuo alrededor del ostoma.
- Secar la piel con pequeños toques sin frotar con una toalla suave.

#### 2 Preparación de la bolsa

- Prepare la nueva bolsa recortando el orificio de la placa adhesiva de acuerdo a la forma y diámetro del ostoma, asegurándose no cortar la bolsa en el proceso. Se recomienda utilizar tijera de punta roma.
- Insertar los dos extremos de la varilla de cierre en los bolsillos en la parte inferior y mantener la varilla de cierre plana y lisa.
- Enrollar la varilla de cierre hacia arriba 5 veces y plegar juntando lo brazos hacia adentro para seguridad.

#### 3 Aplicación de la bolsa

- Asegurar que la piel se encuentre indemne, limpia y seca antes de colocar la placa adhesiva.
- Despegar el papel adhesivo de la placa.
- Despegar el papel adhesivo del anillo de seguridad externo.
- Centrar la placa alrededor del ostoma y presionar suavemente la placa y el anillo de seguridad externo contra la piel hasta que la bolsa se encuentre adherida con seguridad a la piel.
- Presionar suavemente la placa para generar algo de calor que ayudará facilitar la adhesión.

#### 4 Abrir y drenar la bolsa

- Sostener el extremo de la bolsa hacia arriba, desenrollar la varilla de cierre hasta que el borde drenable sea visible. Vaciar el contenido en el inodoro.
- Limpiar los residuos alrededor del borde drenable con papel higiénico.

[www.wellandmedical.com](http://www.wellandmedical.com)



## 5 Cierre de la bolsa

- Enrollar la varilla de cierre hacia arriba 5 veces y plegar juntando los brazos hacia adentro para seguridad.

## 6 Remover, vaciar y desechar la bolsa

- Para desechar la bolsa usada, sostener el extremo de la bolsa hacia arriba, desenrollar la varilla de cierre hasta que el borde drenable sea visible. Vaciar el contenido en el inodoro.
- Aplicar ligera presión a la placa adherida en la piel y suavemente despegar hacia abajo para remover la bolsa. El uso de removedores facilita el retiro de la placa, y reduce la incidencia de problemas en la piel.
- Desechar la bolsa usada en la papelera. No intentar eliminar alguna parte de la bolsa en el inodoro.

## 7 Recomendaciones

- No se recomienda utilizar esta bolsa en pacientes con urostomias y/o fistulas.
- En los pacientes ostomizados, existe un porcentaje significativo de problemas en la piel periestomal. Dichos problemas pueden verse reducidos con el asesoramiento profesional y/o el uso de accesorios (povos protectores, pastas, cremas, etc).
- Para reducir el riesgo de fugas, se recomienda el uso de placas adhesivas que correspondan a la forma del ostoma (planas y convexas).
- El uso y tratamiento de la bolsa debe realizarse conforme a las instrucciones de uso.
- Si hubiera irritación de la piel, contacte con personal de salud.

## 8 Almacenamiento

- El producto es para uso personal y no debe ser usado por alguien más.
- Almacenar siempre las bolsas en un lugar seco y a la temperatura recomendada (0-27°C o 32-80° F). Después que las bolsas han sido removidas de su envase, se debe tener cuidado de almacenarlos adecuadamente.

PPR-INS-PE1 10



 **Welland Medical Ltd.,**  
Hydehurst Lane, Crawley,  
West Sussex RH10 9AS  
United Kingdom

**Tel:** +44 (0) 1293 615455  
**Fax:** +44 (0) 1293 615411  
**Email:** [info@wellandmedical.com](mailto:info@wellandmedical.com)  
(A CiniMed Group Company)

Welland® and the Welland logo™ are trade marks of CiniMed (Holdings) Ltd.

PID 1548 • 22-01-2020