



Stomiplus 250ml

Καθαριστικό περιστομικού
δέρματος σε υγρή μορφή

REF STL-GR CE

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΣΤΟΜΙΑΣ

Καθαριστικό περιστομικού δέρματος σε υγρή μορφή

Οδηγίες Χρήσης:

Καθαρίστε απαλά το δέρμα με την λοσιόν Stomiplus και αφήστε το να στεγνώσει ή σκουπίστε το απαλά με μια πετσέτα πριν τοποθετήσετε το προϊόν στομάχου σας.

Προσοχή: Μόνο για εξωτερική χρήση. Για χρήση σε άθικτη επιδερμίδα μόνο. Αποφεύγετε τη χρήση σε ευαίσθητες περιοχές του δέρματος. Διακόψτε τη χρήση αν υπάρξει ερεθισμός. Μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε με νερό.

Σε περίπτωση σοβαρού περιστατικού, ζητήστε ιατρικές συμβουλές προτού επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή, την Welland Medical Ltd., και την τοπική αρμόδια αρχή μέσω του διανομέα ή εισαγωγέα σας.

Συστατικά:

Νερό, Χυμός Φύλλων Aloe Barbadensis, Πλανθηνόλη, Εκχύλισμα Φύλλων Hamamelis Virginiana, Εκχύλισμα Λουλουδιών Chamomilla Recutita (Matricaria), Γλυκερίνη, Γλυκοσίδιο Καρύδας, Προπυλενογλυκόλη, Υδρογονωμένο Καστορέλαιο PEG-40, Βενζικό Νάτριο, Σορβικό Κάλιο, Φανοξυαιθανόλη, Καπρυλική Γλυκόλη, Δεκυλενογλυκόλη, Αρωμα Αλφα-Ισομεθυλιονίνης, Αμιλ Κιναμαλδεΐδη, Κιναμυμική Αλκοόλη, Κιτρονιλλόλη, Κοιμαρίνη, Γερμανόλη, Εξόλ Κιναμαλδεΐδη, Ισοευνόλη, Λιμονένιο, Τετρανατρίοχο ολάς EDTA, Κιτρικό οξύ, Βενζοσαλικυλικό οξύ, CI 42090 (Blue 1).

Welland Medical Limited
Hydehurst Lane, Crawley
West Sussex RH10 9AS
United Kingdom
www.wellandmedical.com



ΓενικήΧημικών

Γενική Χημικών Προϊόντων Α.Ε.
Αυλής 60, Κηφισιά, 145 64 Αθήνα
Τηλ: 210 6203000
Δωρεάν Κλήση: 800 500 5150
www.gcp.gr

Τα σήματα Welland® και το logo Welland™ ανήκουν στην ClinMed (Holdings) Ltd.



Advena Limited.
Tower Business Centre,
2nd Fl., Tower Street,
Swatar, BKR 4013 Malta



5 024310 963737

STL-GR 11 • PID 2635 • 28-05-2020



Stomiplus
250ml

