



## Stomiplus 250ml

Soluție de curățare pentru  
pielea peristomală

REF STL CE

SISTEME STOMICĂ – ACCESORII

### Soluție de curățare pentru pielea peristomală

#### Instrucțiuni de utilizare:

Curățați pielea cu soluția Stomiplus și lăsați să se usuce sau ștergeți ușor cu un prosop înainte de a aplica sacul colector.

Atenție: Exclusiv pentru uz extern. A se utiliza numai pe pielea intactă. A se evita utilizarea pe zonele sensibile ale pielii. Utilizarea trebuie întreruptă în cazul apariției iritațiilor. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. În cazul contactului cu ochii, a se clăti cu apă.

În cazul unui incident grav, solicitați asistență medicală înainte de a contacta fabricantul, Welland Medical Ltd., și autoritatea competentă locală prin intermediul distribuitorului sau al importatorului.

#### Ingrediente:

Apă, Suc de frunze de Aloe Barbadensis, Panthenol, Extract de frunze de Hamamelis Virginiana, Extract de floare de Chamomilla Recutita (Matricaria), Glicerină, Coco-Glucoside, Propylene Glycol, PEG-40 Ulei de ricin hidrogenat, Benzoat de sodiu, Sorbat de potasiu, Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, Decylene Glycol, Parfum Alpha-Isomethyl Ionone, Amyl Cinnamal, Cinnamyl Alcohol, Citronellol, Coumarin, Geraniol, Hexyl Cinnamal, Isoeugenol, Limonene, Linatol, Tetrasodium EDTA, Acid Citric, Benzyl Salicylate, CI 42090 (Blue 1).

Welland Medical Limited  
Hydehurst Lane, Crawley  
West Sussex RH10 9AS  
United Kingdom  
[www.wellandmedical.com](http://www.wellandmedical.com)




Importator/Distribuitor:  
OrtoProfil Prod Romania S.R.L.  
540253 Târgu Mureș  
Str. Podeni Nr. 44/A  
[www.ortoprofil.ro](http://www.ortoprofil.ro)


Welland® și sigla Welland™ sunt mărci comerciale înregistrate ale CiniMed (Holdings) Ltd.



Dispozitiv medical

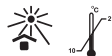

Advena Limited,  
Tower Business Centre,  
2nd Fl., Tower Street,  
Swatara, BKR 4013 Malta

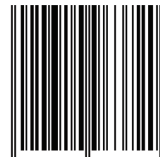

5 024310 963720

STL 12 • PID 1915 • 19-07-2021