



Stomiplus 250ml

Καθαριστικό περιστομικού
δέρματος σε υγρή μορφή

REF STL-GR CE

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΣΤΟΜΙΑΣ

Καθαριστικό περιστομικού δέρματος σε υγρή μορφή

Οδηγίες Χρήσης:

Καθαρίστε απαλά το δέρμα με την λοσιόν Stomiplus και αφήστε το να στεγνώσει ή σκουπίστε το απαλά με μια πετσέτα πριν τοποθετήσετε το προϊόν στομάχας σας.

Προσοχή: Μόνο για εξωτερική χρήση. Για χρήση σε άθικτη επιδερμίδα μόνο. Αποφεύγετε τη χρήση σε ευαίσθητες περιοχές του δέρματος. Διακόψτε τη χρήση αν υπάρξει ερεθισμός. Μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε με νερό.

Σε περίπτωση σοβαρού περιστατικού, ζητήστε ιατρικές συμβουλές προτού επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή, την Welland Medical Ltd., και την τοπική αρμόδια αρχή μέσω του διανομέα ή εισαγωγέα σας.

Συστατικά:

Νερό, Χυμός Φύλλων Aloe Barbadensis, Πλανθινόλη, Εκχύλισμα Φύλλων Hamamelis Virginiana, Εκχύλισμα Λουλουδιών Chamomilla Recutita (Matricaria), Γλυκερίνη, Γλυκοσίδιο Καρύδας, Προτυλενογλυκόλη, Υδρογονωμένο Καστορέλαιο PEG-40, Βενζικό Νάτριο, Σορβικό Κάλιο, Φαινόξαιθανόλη, Καπρυλική Γλυκόλη, Δεκυλενογλυκόλη, Αρωμα Αλφα-Ισομεθυλιονίνης, Αμιλ Κινναμαλδεΐδη, Κινναμυμική Αλκοόλη, Κιτρωνιλλόλη, Κοιμαρίνη, Γερμανόλη, Εξόλ Κινναμαλδεΐδη, Ισοευνόλη, Λιμονένιο, Τετρανατρίοχο ολάς EDTA, Κιτρικό οξύ, Βενζοσαλικυλικό οξύ, CI 42090 (Blue 1).

Welland Medical Limited
Hydehurst Lane, Crawley
West Sussex RH10 9AS
United Kingdom
www.wellandmedical.com



ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Α.Ε. Αυγής 60, Κηφισιά 145 64
Αθήνα, Ελλάδα Τηλ: 210 6203000
Δωρεάν Κλήση: 800 500 5151
www.gcp.gr




WELLCARE EOOD, 19 Yakubitsa
str. 1164, Sofia, България

Τα σήματα Welland® και το logo Welland™ ανήκουν στην ClinlMed (Holdings) Ltd.



Advena Limited.
Tower Business Centre,
2nd Flr., Tower Street,
Swatar, BKR 4013 Malta

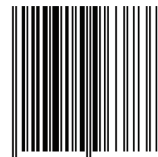

5 024310 963737

STL-GR 13 • PID 2635 • 30-12-2022



Stomiplus
250ml

